

Användarmanual

tydligkalender

BASIC / BASIC+



Tydligkalender.nu

Tel: 020-103370

E-post: support@brstrom.se

<u>Innehållsförteckning</u>	<u>sida</u>
1. Inledning.....	4
2. Komma igång.....	4
3. Anpassa Layout.....	5
4. Analog klocka.....	5
5. Dygnsangivelser & skärmstyrka.....	6
6. Använda bildbakgrund.....	6,7
7. Talstöd.....	7
8. Låst skärmläge	8
9. Inställningsmenyn.....	8
10. Ljud.....	9
11. Byt språk.....	10
12. Skötsel Rengöring och handhavande, rekonditionering.....	11
13. Överensstämmelse med Medicintekniska direktivet.....	11
14. Säkerhet och ansvar.....	12
15. Tekniska Specifikationer	13
16. Support.....	13



Br Ström AB, Filipstadsbacken 56, ing. baksida, 12343 Farsta
Tel: 020—10 33 70 | E-post: info@brstrom.se | www.brstrom.se

16. Säkerhet och Ansvar

Br Ström AB har analyserat riskerna med produkten i enlighet med SS-EN14971. Vid idrifttagning och dagligt användande av produkten är det alltid viktigt att tänka på säkerheten.

Det är i en bruksanvisning som denna inte möjligt att beskriva alla sätt som man inte får använda produkten på. Om du är osäker på om du ställt in eller satt produkten i drift på rätt sätt rekommenderar vi att du tar kontakt med vår supportavdelning.

Br Ström AB är inte ansvariga för eventuella skador, följskador eller förlust som följer av felaktig användning, brist på uppföljning, fel inställning, fel i uppkoppling eller liknande. Br Ström AB's ekonomiska ansvar är vid alla tillfällen begränsat till värdet av produkten.

14. Skötsel, Rengöring och Rekonditionering.

Rengör denna produkt med en lätt fuktad trasa med mildt rengöringsmedel. Använd inte starka lösningsmedel vid rengöring. Produkten får inte nedsänkas i vatten. Vid rekonditionering skall all användardata tas bort.

Förse enheten med nytt användarkonto. Gå in i enhetens inställningar via operativsystemet och välj "Rensa Data" för applikation "Tydlig Kalender". Observera att enheten då återställs till standardinställningar.

För specifik rekonditioneringsmanual kontakta support@brstrom.se

15. Överensstämmelse med Medicintekniska direktivet

Produkten "Tydlig Kalender" marknadsförs som en medicinteknisk produkt klass I för personer med kognitiva funktionsnedsättningar och uppfyller bestämmelserna i (EU) Regelverket MDR2017/745. Teknisk dokumentation med riskanalys finns hos tillverkaren.



PS!
**OM DU VILL KOMMA IGÅNG SNABBT SÅ
KAN DU ANVÄNDA VÅR SNABBGUIDE...**

PS!
**Du hittar manualer, tutorials och in-
formativa videoklipp om hur man an-
vänder kalendern på
www.tydligkalender.nu**

1. Inledning

Tack för att du har valt en "tydlig | kalender basic". Denna kalender kan anpassas så att den information du önskar se på kalendern visas på ett klart och tydligt sätt för dig. Har du valt modell "basic+" kan också välja att få informationen på skärmen uppläst för dig. För att du ska få ut mesta möjliga ur denna produkt vill vi uppmuntra dig att sätta dig in i denna manual.


Placera kalendern på en central plats i hemmet så får du stor nytta av kalendern och dess olika funktioner.

2. Komma igång

Obs! När du är färdig med inställningarna glöm ej låsa enheten om behov finns. Se information på sid 9

Kontrollera att allt finns med i förpackningen när du packar upp enheten. Välj en bra placering i hemmet där du ofta ser kalendern. Kalendern ska normalt vara ansluten till ett vägguttag, så tänk på att vald placering har möjligheter till detta.

Börja med att ansluta kalendern till vägguttaget, nu startar enheten upp och du kommer se tid, datum, dag och dygnsindikation t.ex för-middag eller eftermiddag. Om den inte skulle starta, tryck på den runda knappen på kalenderns baksida.

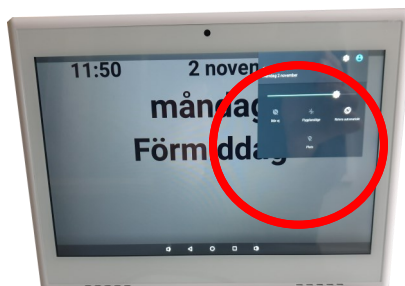

I de flesta fall kommer datum och tid vara korrekta, men om datum och tid är fel så behöver det nu justeras. Det kan du göra genom att ansluta enheten till WIFI om sådant finns. Detta gör du genom att dra ned statusfältet på skärmens övre del och trycka på kugg hjulet.

Då kommer du in i enhetens inställningar. Här väljer du Wifi och ansluter till nät. Om du inte har något wifinät så kan du ställa in datum och tid manuellt i inställningarna genom att trycka på inställningar för datum & tid. För att komma tillbaka till kalendern efter att du har gjort inställningarna trycker du på pilen "tillbaka".

15. Tekniska Specifikationer

Gemensamt: WiFi 802,11b/g/n. Bildformat: jpg/png/bmp, högtalare 2*1W/2*1,5W

Modell	Skärmstorl	Upplösning	Touch	Ansl.	Batteri (valbart)
BASIC 13,3"	13,3"	1920*1080 LCD IPS	10-point	USB Host*2, Micro USB OTG/ TF RJ45,	Ja
BASIC 10,1"	10,1"	800*1280 LCD IPS	10-point	USB 2,0 OTG/host, TF card up to 32GB	Ja
BASIC+ 13,3"	13,3"	1024*600 LCD IPS Talsyntes från Acapella	10-point	USB Host*2, Micro USB OTG/ TF RJ45,	Ja
BASIC+ 10,1"	10,1"	800*1280 LCD IPS Talsyntes från Acapella	10-point	USB 2,0 OTG/host, TF card up to 32GB	Ja

16. Support

På hemsidan tydligkalender.nu hittar du olika tutorials, korta videoklipp och annan information som beskriver hur du använder och anpassar denna produkt.

Tydligkalender.nu

Önskar du personlig support är du varmt välkommen att kontakta oss på:

Tel: 020-103370

E-post: support@brstrom.se

14. Säkerhet och Ansvar


Br Ström AB har analyserat riskerna med produkten i enlighet med SS-EN14971. Vid idrifttagning och dagligt användande av produkten är det alltid viktigt att tänka på säkerheten.

Det är i en bruksanvisning som denna inte möjligt att beskriva alla sätt som man inte får använda produkten på. Om du är osäker på om du ställt in eller satt produkten i drift på rätt sätt rekommenderar vi att du tar kontakt med vår supportavdelning.

Br Ström AB är inte ansvariga för eventuella skador, följdskador eller förlust som följer av felaktig användning, brist på uppföljning, fel inställning, fel i uppkoppling eller liknande. Br Ström AB's ekonomiska ansvar är vid alla tillfällen begränsat till värdet av produkten.

3. Anpassa Layout

Med denna kalender kan du göra många anpassningar för att kalenderskärmens layout ska passa dig. Du justerar vilken information som visas genom att trycka i cirka två sekunder mitt på kalender skärmen. Du justerar vilket färgalternativ genom att trycka i övre högra hörnet i cirka två sekunder.

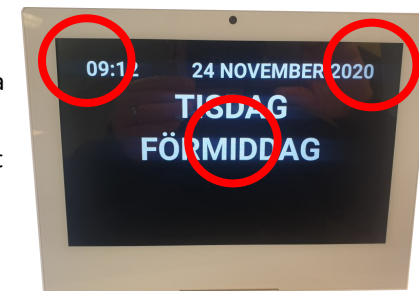

Information som visas:	Veckodag-Dygnsangivelse-Tid (3 olika positioner) Veckodag-Dygnsangivelse Tid Tid-Datum
Färgalternativ:	Vit bakgrund, Svart text Svart bakgrund, Vit text Flera olika färgfält, Svart/Vit text Blå bakgrund, Vit text Turkos bakgrund, Svart text Lila bakgrund, Svart text

4. Analog klocka

Om analog klocka önskas kan detta alternativ väljas i inställningsmenyn under rubriken "Skärminställningar".

OBS! För att komma in i kalenders inställningsmeny trycker du i cirka två sekunder i det övre vänstra hörnet.

När analog klocka är vald i inställningsmenyn kan du på kalenderskärmen göra fortsatta anpassningar. Observera att det i läget för analog klocka endast finns två färglägen; svart bakgrund med vit text eller vit bakgrund med svart text. Det finns tre olika urverk för den analoga klockan att växla mellan. Du justerar genom att trycka i cirka två sekunder i det övre högra hörnet. Vilken information som ska visas justeras genom att trycka i cirka två sekunder i mitten på kalenderskärmen (Se bild på sid 5.)

5. Dygnsangivelser & Skärmstyrka

Kalendern har fördefinierat perioder för dygnsangivelserna Morgon, Förmiddag, Eftermiddag, Kväll och Natt. Perioderna är: Morgon 06.00-9.30, Förmiddag 9.30-12.00, Eftermiddag 12.00-18.00, Kväll 18.00-22.00, Natt 22.00-06.00.

Dessa angivelser kan justeras efter önskemål. Inställningar görs i inställningsmenyn under rubriken "Tids Inställningar". Här kan också inställningar göras för att definiera vilken information som ska visas på kalendern för olika delar av dygnet.

Här kan du också bestämma om skärmen ska ge ett svagare sken någon del av dygnet. Om du önskar ett svagare ljus på skärmen under natten kan du under rubriken "Inställningar för Natt" trycka på Natt ljusstyrka. Här kan du definiera ett värde mellan 0 och 100 för att anpassa ljusstyrkan.

6. Att använda Bild som bakgrund till kalendern.

Bild / Foto kan användas som bakgrund till kalendern. "Foto" måste väljas i inställningsmenyn under "Skärm Inställningar". För att välja bild behöver det finnas bilder på enheten. Du kan lägga över egna bilder via ett USB minne eller ansluta enheten till ett Google Drive konto. Om du använder ett USB minne behöver du access till enhetens operativsystem för att kunna flytta filer.

För att använda bilder behöver du ha access till operativsystemet. (se rutan på sidan 7) Placera sedan USB minnet i något av uttagen i din kalender.

1. När USB minnet sätts in kommer ikonen för USB anslutning att visas i det övre statusfältet. (Om det inte syns, kan du svepa nedåt från övre skärmen).
2. Tryck på utforska och markera de bilder du ska använda. Markera genom att trycka på bilden /bilderna en längre stund.
3. När du har markerat den /de bilder du ska använda så trycker du på de tre prickarna i övre högra fältet och väljer "kopiera till".
4. Spara sedan bilderna på intern lagring. Välj plats och tryck på kopiera.

När bilden /bilderna är överförda kan du gå tillbaka till kalendern genom att trycka på appen "Tydlig Kalender". Innan du går vidare bör du i Inställningsmenyn under rubriken "Program Inställningar" göra justeringen "Välj som Hem-applikation". När detta är gjort behöver du välja "Tydlig kalender" och trycka på pil tillbaka i nedre navigationsfältet.

12. Skötsel, Rengöring och Rekonditionering.

Rengör denna produkt med en lätt fuktad trasa med mildt rengöringsmedel. Använd inte starka lösningsmedel vid rengöring. Produkten får inte nedsänkas i vatten. Vid rekonditionering skall all användardata tas bort.

Förse enheten med nytt användarkonto. Gå in i enhetens inställningar via operativsystemet och välj "Rensa Data" för applikation "Tydlig Kalender". Observera att enheten då återställs till standardinställningar.

För specifik rekonditioneringsmanual kontakta support@brstrom.se

13. Överensstämmelse med Medicintekniska direktivet

Produkten "Tydlig Kalender" marknadsförs som en medicinteknisk produkt klass I för personer med kognitiva funktionsnedsättningar och uppfyller bestämmelserna i (EU) Regelverket MDR2017/745. Teknisk dokumentation med riskanalys finns hos tillverkaren.



11. Byt Språk


Denna enhet kommer förkonfigurerad som Svensk, Dansk eller Norsk men kan ändras till en mängd olika språk. Följ nedanstående steg för att anpassa till annat språk. (Obs internet anslutning kan krävas för att ändra till mindre vanliga språk)

1. Se till att du har tillgång till operativsystemet (se rutan på sid 6)
2. Gå till Inställningar i operativsystemet.
3. Välj "Appar" och välj här appen "Tydlig Kalender"
4. Tryck på lagerutrymme?? Och välj Rensa all data.
5. Gå tillbaka till Inställningarna i operativsystemet och välj Språk & input.
6. Välj rubrik Språk och ange det språk som kalendern ska ha.
7. När rätt språk är valt väljer du rubriken Text-till-Tal och trycker på "Lyssna på ett exempel". Om du hör en syntetisk röst nu så hoppa till punkt. (gäller BASIC+)
8. Om du inte hör någon syntetisk röst behöver du trycka på kugghjulet intill vald talmotor och trycka på "Installera Röstdata" (gäller BASIC+)
9. Välj det språk som önskas. (gäller BASIC+)
10. När denna har laddats ner trycker du på "Lyssna på ett exempel" under rubriken Text-till-Tal. Nu ska du höra en syntetisk röst. (gäller BASIC+)
11. Gå tillbaka till operativsystemet och välj appen "Tydlig Kalender". Nu ska du se kalendern, dag, månad, tid på dagen osv i det valda språket. (Kalenderhändelser kommer i det språk de skrevs in på, t.ex "Besöka läkaren" eller "قم بزيارة الطبيب" dessa översätts inte.)
12. Kalendern är nu nollställd och du behöver göra de anpassningar du önskar för kalendern.

Nu kan du välja bild som bakgrund. Gå till "Foto/Drive Inställningar" i Inställningsmenyn och markera knappen vid "Välj fil". När du nu går tillbaka till kalendervyn kommer du att få välja bild bland de bilder du har fört över. Bland inställningarna för bilder kan du även välja att använda bildens originalstorlek, visa bildens titel, köra ett bildspel bland de olika bilder som finns och anpassa bildspelets hastighet.

För att få access till enhetens operativsystem

För att få access till enhetens operativsystem behöver du i inställningsmenyn under rubriken "Program Inställningar" ändra så att "Välj som Hem-applikation" inte är markerad. När du har gjort detta kan du trycka på hemknappen, den runda, i nedre navigationsfältet. (Om du inte ser det nedre navigationsfältet sveper du uppåt från botten av skärmen.) När du tryckt på hemknappen ska du välja "Launcher3" istället för Tydlig Kalender. När du nu trycker en gång till på hemknappen kommer du till operativsystemet. När du är färdig med inställningar i operativsystemet bör du återställa så att "Tydlig Kalender" är Hem-applikation.

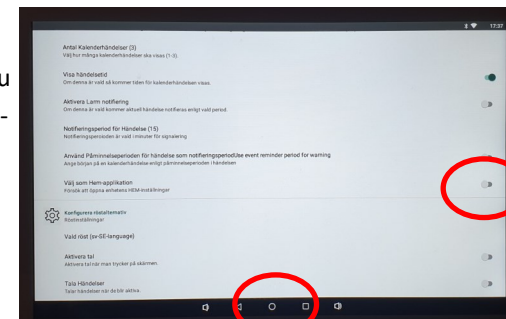

7 .Talstöd (endast för modell BASIC+)

Om du har valt produkten "Tydlig Kalender BASIC+" så finns ett inbyggt talstöd som gör att du kan få informationen som visas på skärmen uppläst för dig. Talstödet kan också användas för att påminna dig om kalenderhändelser som snart inträffar. Talstödet är valbart och kan startas eller avslutas via inställningsmenyn för kalendern. Inställningsmenyn syns inte via kalenderskärmen. Det finns ingen synlig knapp för inställningarna.

OBS! För att komma in i kalenderns inställningsmeny trycker du i cirka två sekunder i det övre vänstra hörnet.

Talstödet finner du under delen "Program Inställningar" i inställningsmenyn finns längst ner inställningar för talstöd. Här ställer du knappen åt höger vid rubriken "Aktivera Tal", när du sedan går tillbaka till kalenderskärmen och trycker på skärmen på någon information så kommer den att läsas upp (Observer att det vid första gången kan ta cirka 4-5 sekunder för rösten att hinna starta upp.)

8. Låst skärmläge



När alla inställningar har gjorts och eventuell kalenderfunktion kopplats bör skärmen låsas så att inga justeringar görs av misstag. Man låser skärmen genom att i snabb följd trycka 8 ggr på skärmens övre vänstra hörn. När den låses syns kort meddelandet "Options Locked". Nu är skärmen låst och det går inte att komma till inställningsmenyn eller göra layoutförändringar på skärmen. För att låsa upp gör man samma tryckningar så syns meddelandet "Options Unlocked"

9. Inställningsmenyn

Inställningsmenyn kommer du åt när enheten är i olåst läge. (se bild) Tryck på visningsskärmens övre vänstra hörnet i cirka 2 sekunder.

I inställningarna kan du se de olika rubrikerna, under rubrikerna finns beskrivning av de inställningar som görs:

Program Inställningar



Här anpassar du hur programmet ska fungera för den aktuella enheten. .

Under "program inställningar" finns funktionen för att sätta kalendern som "HEM-applikation", med denna definieras kalendern som enhetens "start"

applikation och den återgår till "Tydlig Kalender" varje gång man trycker på det nedre navigationsfältets hemknapp. Längst ner i "Program Inställningar" finns konfigureringen för röstalternativ.

Skärm Inställningar

Här anpassar du hur skärmens information ska presenteras. Du kan välja att använda analog eller digital klocka. Det finns också möjlighet att använda kalendern med valfri bakgrundsbild. (se sid 5) Texten som visas kan anpassas och olika justeringar av texten kan göras.

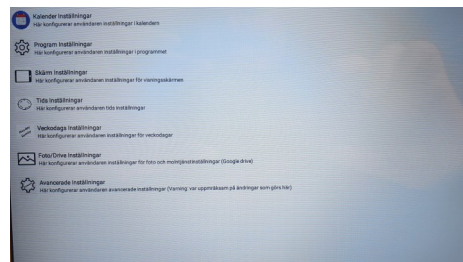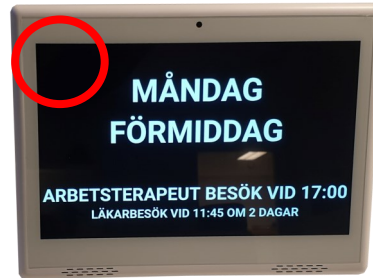

Tids Inställningar

Här definierar du de olika dygnets delar. (Morgon, Förmiddag, Eftermiddag, Kväll, Natt) När perioderna startar och slutar, om någon speciell text ska visas för viss period. Du kan också justera ljusstyrkan för perioden t.ex. så att skärmen ger ett svagare sken under natten. Möjligheter finns också att anpassa vad som visas på skärmen.

Veckodags Inställningar

Här kan texten justeras för enskilda veckodagar (Sö-Lö)

Foto/Drive Inställningar

Om alternativ "Foto" väljs under skärminställningar så är det här du ställer in var bilder ska hämtas ifrån för att visas på skärmen. Det går att hämta bilder från molntjänsten Google Drive genom att hänvisa till en specifik mapp, det går också att lägga in bilder på enhetens interna minne via ett USB minne och därifrån visa enskilda bilder eller bildspel med flera bilder. I dessa inställningar väljer du alltså var bilderna ska hämtas ifrån och när du sedan går tillbaka till visningsskärmen så kommer det dyka upp en hänvisningsruta där du får välja vilken/vilka lokala bilder som ska visas eller vilket Google konto som bilderna ska hämtas ifrån.

Avancerade Inställningar

Här kan du specialanpassa flera olika delar. Platsen du väljer kommer definiera det språk som används via "Base locale-ID" t.ex "en_GB" för engelska. För att byta språk se information på sid 11.

Textstorlek för de olika delarna av skärmen kan anpassas genom att justera någon av de 8 semikolon avgränsade värdena. Texttyp och färger på olika tider för dagen kan justeras. Vi rekommenderar dig att kontakta vår support om du önskar specialanpassa enheten.

10. Ljud

Ljudet kan höjas och sänkas via de två yttersta knapparna i det nedre navigationsfältet. För att justera ljudet dra ner statusfältet i övre högra hörnet. Dra ner verktygsfältet på skärmens ovansida för att se att det är tal-ljud och inte notifieringsljudet du justerar.

